

Universal knäkomprimerande kryoterapienhet

FÖRDELAR MED KRYOTERAPI

- Begränsning av blödning och hematom i fossa poplitea
- Lindrar smärta
- Motverkar ödem
- Kompatibel med endagskirurgi
- Enkel att använda hemma



Excell' ICE



Excell'ICE-kylkiten kombinerar kryoterapi med modulerad statisk kompression med hjälp av en pump.

Dess lättanvända teknik växlar mellan komprimerande kyla under återhämtnings- och/eller läkningssessioner. Vanligtvis rekommenderas det att behandlingen utförs dagarna efter en skada eller efter en operation.

Det är välkänt att extern statisk kompression med is ökar kylningsgraden vid hudens yta.

Ett unikt nytt koncept där kompressionskammaren är direkt integrerad i kylförpackningen gör den mycket enklare att använda. Denna nya teknik gör det lättare att genomföra 20–30 minuter långa återhämtningssessioner med kryoterapi-kompression. Dessa portabla enheter är mycket praktiska att använda hemma eller när man reser.

För idrottare kommer den att lindra muskel- och skelettsmärta direkt efter match eller tävling och göra det möjligt för

dem att återhämta sig optimalt, och därigenom minska den tid de inte kan tävla på grund av smärta, skador, utmattning osv.



Rekommenderad användning:
20 minuter med session var 4:e timme
Första sessionen sker i operationssalen efter bandagering

Tillverkad i Europa



Medicinteknisk
produkt



Uppfyller EU-krav

INDIKATIONER

- Post-operativ vård
- Smärtstillande behandling
- Idrottstraumatologi
- Efter rehabiliteringssession

KONTRAINDIKATIONER

- Allergi mot kyla
- Okänslighet mot kyla
- Raynauds syndrom
- Kryoglobulinemi
- Arterit
- Diabetes
- Polyartrit

Excell' ICE



Kryokit för knä

Vi presenterar detta kryokit för knä, en lösning för knäkylning som är otroligt lätt att använda. Med sin universaldesign som passar alla, fungerar den för alla knä. Detta kit innehåller både ① bakre ② och främre kylförpackningar, vilket ger komplett täckning av ditt knä. Den innovativa designen kombinerar kylterapi med kompression i en enda, praktisk enhet. Uppnå optimal kompression med hjälp av den medföljande manuella pumpen ③.

Ledat knästöd

Det ledade knästödet i en storlek är enkelt att sätta på knäet. Vinkeln på knäets böjning kan justeras eller blockerats i en viss vinkel. Rekommenderas efter knäoperation eller -skada.



Säkert ledat knästöd (komplett förpackning, inklusive kryokit)
Ref. ORT20GEN-A1P

Kryokit för knä (utan stöd)
Ref. ORT40PACK-G



Orthonov

3 rue de Villebon - 91160 Saulx-les-Chartreux - France
Telefon: +33 1 60 13 65 73 - E-post: contact@orthonov.com
SIRET: 820 720 068 00023 / VAT: FR01820720068

 Distribueras av: **Micromedic AB**

111 52 Stockholm, Sweden
Telefon: +46 8 22 40 20
E-post: micromedic@micromedic.se